

Indikasjon for henvisning for CI-utredning

Henvisningskriterier for cochleaimplantat (CI) til voksne og postlingvalt døde

Minimal nytte av høreapparat

Personer med minimal eller liten effekt av optimalt tilpasset høreapparat.

Hørselskriterier

- Hørselstap på 60 dB eller mer ved 1000 Hz.
- Hørselstap på 75 dB eller mer ved 2000 Hz og oppover.
- Ensidig døvhets med plagsom tinnitus.
- Mistanke om auditiv nevropati med nedsatt taleoppfattelse.
- Ved **alvorlig hørselstap etter meningitt** er akutt hjelp nødvendig.

Individuell vurdering

Det er ingen absolutte grenser. CI-klinikkene vil ved utredning gjøre en tverrfaglig og individuell vurdering.

Henvisningen bør inneholde:

- ☐ Hørselshistorikk (årsak, arvelighet, bruk av høreapparat, m.m.)
- ☐ Flest mulig tidligere audiogrammer
- ☐ Hvis det er gjort andre spesialtester, eks.: reflekser, OAE, ABR, etc.,
- ☐ Informasjon om kommunikasjonsform og bruk av tegnspråk
- ☐ Øvrig helseinformasjon
- ☐ Gjerne CT tinningben med aksiale snitt 0,5 mm og coronale rekonstruksjoner, samt MR tinningben
- ☐ Behov for språk-, tegn-, eller skrivefolk

www.cochlear.no   

Kriteriene er hentet fra: <https://www.oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/cochleaimplantat-ci/#henvisningsrutiner-for-helsepersonell>

Dette materialet er ment for helsepersonell. Hvis du er forbruker, oppsøk helsepersonell for råd om behandling for hørselstap. Resultatene kan variere, og helsepersonellet vil informere deg om de faktorer som kan påvirke resultatet som du får. Les alltid instruksjonene før bruk. Ikke alle produkter er tilgjengelige i alle land. Ta kontakt med din lokale Cochlear-representant for produktinformasjon. Cochlear, Hear now. And always, Nucleus og den elliptiske logoen er enten varemerker eller registrerte varemerker som tilhører Cochlear Limited.

© Cochlear Limited 2025. D1923935 V3 2025-12 Norwegian

